

Gebrauchsanweisung Patientenwaschkonzepte Premium – Chlorhexidin

Körperwaschkonzepte/ WashMitt - Chlorhexidin



MA 909 WM-8
Chlorhexidin

Einzelne, ungeöffnete Packung 45 Sek. bei 650 Watt in der Mikrowelle erwärmen.
Unterschiedliche Gerätetypen der Mikrowellen beachten und Erwärmungszeiten anpassen.
Überhitzung/Aufblähen der Packungen vermeiden.

- Packung vor der Anwendung noch 1 Minute geschlossen halten.
- Durch langsames Ziehen der Lasche an der Oberseite lässt sich die Packung leicht öffnen
- Kontrollieren Sie, ob die Temperatur der Tücher für den Patienten angenehm ist.
Der Klebestreifen ermöglicht einfaches Wiederverschließen.
- Bitte darauf achten, dass eine sanfte Reinigung bei geschlossenen Augen der Patienten erfolgt.
- In der geschlossenen Packung bleiben die Tücher/Waschhandschuhe ca. 15 bis 20 Minuten warm.
- Wasser, Seife, Handtücher und Körperlotion werden nicht benötigt.

Empfehlung für die antiseptische Ganzkörperwaschung

- Je 1 Waschhandschuh für folgenden Körperbereiche verwenden
- Je 1 Packung patientenbezogen verwenden

1. Gesicht, Nacken, Brust
2. Linker Arm und Achselhöhle
3. Rechter Arm und Achselhöhle
4. Unterleib vorne
5. Linkes Bein
6. Rechtes Bein
7. Rücken
8. Unterleib hinten mit Perianalbereich

Zur Optimierung der Dekolonisierungsmaßnahmen wird die antibakterielle Shampoo Cap MA 906 empfohlen



- Waschhandschuhe nicht durch die Toilette entsorgen.
- Nach einmaliger Anwendung nicht wieder erwärmen (Gefahr der Kreuzkontamination)
- Empfehlung: Verbrauch der Waschhandschuhe bei geöffneter Packung innerhalb von 24 Stunden