

## Körperwaschkonzepte Wash ,n' Care

**MA 907 3**  
antibakteriell



**MA 907 8**  
antibakteriell



**MA 907 1**  
parfümiert



**MA 907 2**  
parfümfrei



**MA 907 6**  
parfümiert



**MA 907 7**  
parfümfrei



Ungeöffnete Packung 45 Sek. - 1 Minute bei 650 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Erwärmungszeiten je nach Gerätetyp unterschiedlich sein können und entsprechend anzupassen sind.

- Packung vor der Anwendung noch 1 Minute geschlossen halten.
- Durch langsames Ziehen der farblich gekennzeichneten Lasche die Packung sorgsam öffnen, die Waschhandschuhe einzeln entnehmen und die Packung wieder verschließen. Somit bleiben die Waschhandschuhe in der Packung ca. 15 bis 20 Min. warm.
- Kontrollieren Sie, ob die Temperatur der Waschhandschuhe für den Patienten angenehm ist.
- Ganzkörperwaschung nach Pflegeplan durchführen. Sanfte Gesichtereinigung bei geschlossenen Augen beachten.
- Wasser, Seife, Handtücher und Körperlotion werden nicht benötigt.

## Haarwaschkonzepte Wash ,n' Care

**MA 907 5**  
antibakteriell



Ungeöffnete Packung ca. 20 Sekunden bei 650 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Erwärmungszeiten je nach Gerätetyp anpassen.

- Temperatur der Haube und des Gummizuges testen.
- Haube so auf den Kopf setzen, dass alle Haare bedeckt sind.
- Shampoo ca. 3 Minuten sanft einmassieren.
- Haube abnehmen und entsorgen.
- Bitte nicht Nachspülen! Trocknen nach Bedarf!

**MA 907 4**  
parfümiert



### Empfehlung für die antiseptische Ganzkörperwaschung

1. Hals, Nacken und Gesicht
  2. Brust
  3. Rechter Arm und Achselhöhle
  4. Linker Arm und Achselhöhle
  5. Unterleib vorne mit Leisten und Urogenitalbereich
  6. Rechtes Bein
  7. Linkes Bein
  8. Füße
  9. Rücken
  10. Unterleib hinten mit Perianalbereich
- und 1 Shampoo Cap für die Haarwäsche

jeweils 1 Packung Patienten bezogen verwenden

### Empfehlung für die nicht- antiseptische Ganzkörperwaschung

1. Gesicht, Nacken, Brust
2. Linker Arm und Achselhöhle
3. Rechter Arm und Achselhöhle
4. Unterleib vorne
5. Linkes Bein
6. Rechtes Bein
7. Rücken
8. Unterleib hinten mit Perianalbereich

jeweils 1 Packung Patienten bezogen verwenden

- Tücher/Waschhandschuhe/Shampoo Caps nicht durch die Toilette entsorgen.
- Nach einmaliger Anwendung nicht wieder erwärmen (Gefahr der Kreuzkontamination)

