

Patientenwaschkonzepte

Gebrauchsanweisung



KÖRPERWASCHKONZEPTE - ANTIBAKTERIELL

Einzelne, ungeöffnete Packung 1 Min. bei 650 bis 750 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Unterschiedliche Gerätetypen der Mikrowellen beachten und Erwärmungszeiten anpassen. Überhitzung/Aufblähen der Packungen vermeiden

- Packung vor der Anwendung noch 1 Minute geschlossen halten
- Durch langsames Ziehen der Lasche an der Oberseite lässt sich die Packung leicht öffnen
- Nach dem Erwärmen der Packungen kontrollieren Sie bitte, ob die Temperatur der Tücher für den Patienten angenehm ist. Der Klebestreifen ermöglicht einfaches Wiederverschließen
- Bitte darauf achten, dass eine sanfte Reinigung bei geschlossenen Augen der Patienten erfolgt
- In der geschlossenen Packung bleiben die Tücher ca. 15 bis 20 Minuten warm
- Wasser, Seife, Handtücher und Körperlotion werden nicht benötigt
- **Bei den antibakteriellen Produkten ist eine Einwirkzeit von 1 Minute zu beachten!**

Empfehlung: Für die antiseptische Ganzkörperwaschung je 1 Packung für den Patienten verwenden. Pro Körperbereich sollte jeweils 1 Tuch oder Waschhandschuh verwendet werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden

1. Hals, Nacken und Gesicht
2. Brust
3. Rechter Arm und Achselhöhle
4. Linker Arm und Achselhöhle
5. Unterleib vorne mit Leisten und Urogenitalbereich

6. Rechtes Bein
7. Linkes Bein
8. Füße
9. Rücken
10. Unterleib hinten mit Perianalbereich

und 1 Shampoo Cap - Antibakteriell - für die Haarwäsche



MA 908
Antibakterielle
Feuchttücher



DY 301
Antibakterielle
Kopfwashhaube

HAARWASCHKONZEPTE

Ungeöffnete Packung ca. 20 Sekunden bei 650 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Erwärmungszeiten je nach Gerätetyp anpassen

- Temperatur der Haube und des Gummizuges testen
- Haube so auf den Kopf setzen, dass alle Haare bedeckt sind
- Shampoo ca. 3 Minuten sanft einmassieren
- Haube abnehmen und entsorgen
- Bitte nicht Nachspülen! Trocknen nach Bedarf!



⌘ Tücher/Shampoo Caps nicht durch die Toilette entsorgen
⌘ Nach einmaliger Anwendung nicht wieder verwenden (Gefahr der Kreuzkontamination)

RUFEN SIE UNS AN ODER KONTAKTIEREN SIE UNS PER E-MAIL

medadvance



02242 874487



info@medadvance.de,
www.medadvance.de



MedAdvance GmbH & Co KG
Reisertstr. 24
D-53773 Hennef