

KÖRPERWASCHKONZEPTE

Einzelne, ungeöffnete Packung 1 Min. bei 650 bis 750 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Unterschiedliche Gerätetypen der Mikrowellen beachten und Erwärmungszeiten anpassen. Überhitzung/Aufblähen der Packungen vermeiden

- Packung vor der Anwendung noch 1 Minute geschlossen halten.
- Durch langsames Ziehen der Lasche an der Oberseite lässt sich die Packung leicht öffnen
- Nach dem Erwärmen der Packungen kontrollieren Sie bitte, ob die Temperatur der Tücher für den Patienten angenehm ist. Der Klebestreifen ermöglicht einfaches Wiederverschließen.
- Bitte darauf achten, dass eine sanfte Reinigung bei geschlossenen Augen der Patienten erfolgt.
- In der geschlossenen Packung bleiben die Tücher/Waschhandschuhe ca. 15 bis 20 Minuten warm.
- Wasser, Seife, Handtücher und Körperlotion werden nicht benötigt.

Empfehlung: Für die nicht-antiseptische Ganzkörperwaschung je 1 Packung für den Patienten verwenden. Pro Körperbereich sollte jeweils 1 Tuch oder Waschhandschuh verwendet werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Gesicht, Nacken, Brust | 5. Linkes Bein |
| 2. Linker Arm und Achselhöhle | 6. Rechtes Bein |
| 3. Rechter Arm und Achselhöhle | 7. Rücken |
| 4. Unterleib vorne | 8. Unterleib hinten mit Perianalbereich |
- und 1 Shampoo Cap für die Haarwäsche**



BED BATH TÜCHER | PARFÜMFREI
Tuchgröße 32 x 22 cm
ART.-NR. DY 200



BED BATH TÜCHER | PARFÜMIERT
Tuchgröße 32 x 22 cm
ART.-NR. DY 200F



**WASH MITTS GENOPPTE
WASCHHANDSCHUHE | PARFÜMFREI**
Handschuhgröße 22 x 17,5 cm
ART.-NR. DY 400

HAARWASCHKONZEPTE

Ungeöffnete Packung ca. 20 Sekunden bei 650 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Unterschiedliche Gerätetypen der Mikrowellen beachten und Erwärmungszeiten anpassen. Überhitzung/Aufblähen der Packungen vermeiden.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Temperatur in der Haube und am Gummizug testen.• Haube so auf den Kopf setzen, dass alle Haare bedeckt sind.• Shampoo ca. 3 Minuten sanft einmassieren. | <ul style="list-style-type: none">• Haube abnehmen und entsorgen.• Haar einmal durchkämmen.• Bitte nicht Nachspülen! Trocknen nach Bedarf! |
|---|--|



KOPFWASCHHAUBE
Mit leichter Duftnote
ART.-NR. DY 300



- ☒ Tücher/Waschhandschuhe/Shampoo Caps nicht durch die Toilette entsorgen
- ☒ Nicht wieder verwenden (Gefahr der Kreuzkontamination)



medadvance